

POSTUP PŘI SVLÉKÁNÍ OCHRANNÉHO ODĚVU

Odbor biologické ochrany Těchonín

Voděodolný empír



ODBOR BIOLOGICKÉ OCHRANY

VOJENSKÝ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

Postup svlékání ochranných pomůcek:

- základní princip – nespěchat!
- svlékání neustále prokládat dezinfekcí rukou
- použít 3 samostatné nádoby s dezinfekcí, označené č. 1, č. 2 a č. 3
- nesahat na vnitřní plochy empíru a rukavic
- na podlahu je vhodné předem vyznačit „čistou“ a „špinavou“ zónu, např. lepicí páskou

1. Provést dezinfekci svrchních rukavic a celé přední plochy empíru, dezinfekce č. 1.



2. Rozvázat tkanici empíru v pase.



- 3. Pomalu tahem svléknout empír.**
Tkanice za krkem jde tahem
za ramena empíru snadno
roztrhnout. (není nutno rozvazovat
tkanice za krkem a dotýkat se krku
rukavicemi)



- 4. Dezinfikovat rukavice,**
dezinfekce č. 1.



- 5. Svléknout svrchní rukavice**
a vyhodit je do připraveného barelu
nebo pytle na infekční odpad.



6. **Odlepit textilní pásku**, kterou byla přilepena manžeta empíru na spodní rukavici. Využít záložku vytvořenou na textilní pásce při oblékání.



7. **Dezinfikovat rukavice**,
dezinfekce č. 2.



8. **Pomalu tahem za vnější plochy**
sundat empír postupným
rolováním. Vyvarovat se víření
infekčního aerosolu.





- 9. Vyhodit empír do pytle
nebo připraveného barelu
na infekční odpad.**



- 10. Dezinfikovat rukavice,
dezinfekce č. 2.**



11. Pomalu tahem zezadu dopředu sundat čepici.



12. Dezinfikovat rukavice, dezinfekce č. 2.




13. Zavřít oči a pomalu zezadu dopředu sejmout ochranné brýle. Vyvarovat se dotyku rukavic s obličejem.

Brýle pro opakované použití pověsit na určený stojan nebo uložit do připravené nádoby.



**14. Dezinfikovat rukavice,
dezinfekce č. 2.**

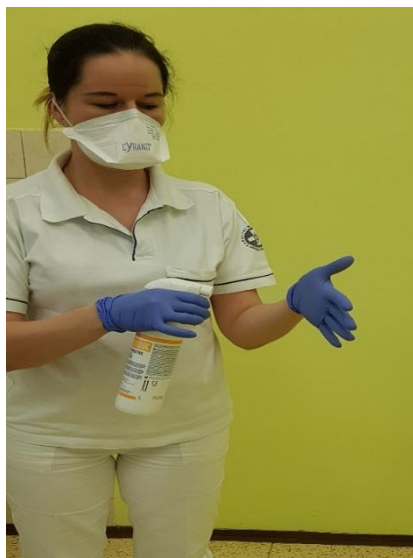

**15. Zavřít oči a zezadu dopředu
sejmout za tkaničky respirátor
FFP3. Opět se vyvarovat dotyku
rukavic s obličejem. Respirátor
vyhodit do pytle na infekční odpad.**



**16. Dezinfikovat rukavice,
dezinfekce č. 2.**



- 17. Svléknout spodní rukavice** – první svléknout uchopením za vnější povrch rukavice, druhou svléknout tahem za vnitřní povrch.



- 18. Dezinfikovat ruce,**
dezinfekce č. 3.



19. Vyzout holínky vykročením mimo kontaminovanou plochu a obout čistou obuv.



20. Při použití holínek provést jejich povrchovou dezinfekci, dezinfekce č. 3.



21. Umýt ruce mýdlem a následně provést řádnou dezinfekci rukou.

