

POSTUP PŘI OBLÉKÁNÍ OCHRANNÉHO ODĚVU

Odbor biologické ochrany Těchonín

*Chirurgická
ústenka/respirátor,
brýle a rukavice
mimo zdravotnické
zařízení*



ODBOR BIOLOGICKÉ OCHRANY

VOJENSKÝ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

Obecné zásady práce v ochranných pomůckách:

- a. nedotýkat se obličeje
- b. chránit zejména sliznice dýchacích cest a očí
- c. minimalizovat kontakt s osobami a kontaminovanými povrchy
- d. kompletace a kontrola neporušenosti ochranných pomůcek
- e. při oblékání i svlékání nespěchat
- f. před oblékáním je vhodné se přiměřeně napít a dojít si na toaletu
- g. vhodné si promyšleně předem připravit vše potřebné k plnění úkolů

0. Připravit ochranné pomůcky.


Chirurgickou ústenku/respirátor, pár rukavic, ochranné brýle.



1. Umýt ruce. Použít mýdlo a dezinfekci.



2. Uchopit ústenku/respirátor.

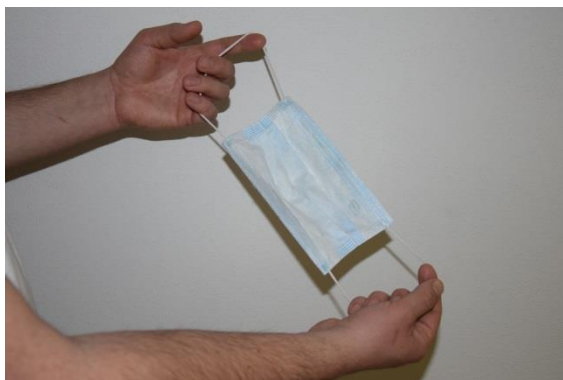



3. Nasadit ústenku/respirátor.



4. Utěsnit ústenku/respirátor.



5. Nasadit brýle.



6. Nasadit rukavice.



7. Kontrola úplnosti ochranných pomůcek

Během práce v ochranných pomůckách:

- Nedotýkat se obličeje
- Nesahat na ochranu očí, úst a nosu
 - Nesahat na brýle
 - Nesahat na respirátor/ústěnku
- Minimalizovat kontakt s kontaminovanými povrchy
- Postupovat s klidem
- Promýšlet činnost dopředu