

POSTUP PŘI SVLÉKÁNÍ OCHRANNÉHO ODĚVU

Odbor biologické ochrany Těchonín

*Chirurgická
ústenka/respirátor,
brýle a rukavice
mimo zdravotnické
zařízení*



ODBOR BIOLOGICKÉ OCHRANY

VOJENSKÝ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

Postup svlékání ochranných pomůcek:

- Základní princip – nespěchat!
- Nesahat na obličej
- Nesahat na vnější stranu ústenky/respirátoru a brýlí (hrozí zavlečení infekce z rukou či rukavic do očí, úst, nosu) – pokud dojde ke kontaktu, odezinfikovat ruce

1. Svléknout rukavice.

a) Uchopit rukavici za vnější povrch.



b) Pomalým tahem stáhnout.



c) Vyhodit do určené nádoby na odpad.



d) Prsty vsunout pod vnitřní stranu rukavice.




e) Pomalým tahem stáhnout.



f) Vyhodit do určené nádoby na odpad.



2. Dezinfikovat ruce.

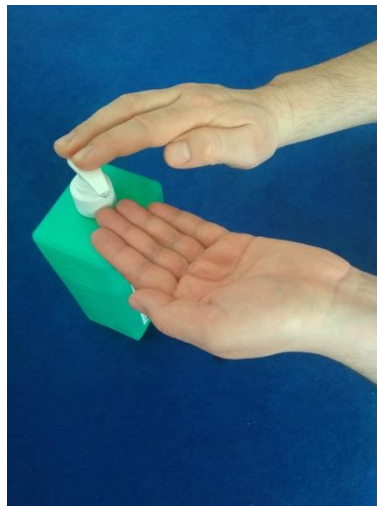

3. Sejmout brýle.

Nesahat na přední část brýlí!
Uchopit za nožičky vzadu nebo za pásek
a pomalu sejmout.
Odložit brýle stranou k další
dekontaminaci.
(Postup dle dostupných dezinfekčních
prostředků)



4. Sejmout ústenku/respirátor.

Nesahat na přední část ústenky
či respirátoru!
Uchopit za poutka nebo gumičku vzadu.
Přetáhnout přes hlavu nebo rozvázat.



5. Vyhodit do určené nádoby na odpad.



6. Dezinfikovat ruce.

